
GlucoMen[®]
areo 2K
Paso a paso



Medidor
inteligente de
glucosa y cuerpos
cetónicos con
conectividad
integrada



EN DIABETES
¡MEJOR CONECTADOS!


ANÁLISIS SIN BOTONES

de glucosa y cuerpos cetónicos



Con las manos limpias y secas, introduce la tira reactiva en el medidor hasta oír la señal acústica. Aparecerá **Glu** (para glucosa) o **Ket** (para cuerpos cetónicos) en la pantalla*

Realiza la punción

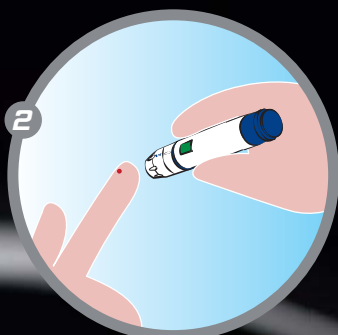

Toca el extremo de la tira reactiva con la gota de sangre hasta oír la señal acústica, sin presionar los botones azules laterales


Se muestran los resultados en pantalla en tan sólo 5 segundos para glucosa y 8 segundos para cuerpos cetónicos



Desecha la lanceta y la tira reactiva de forma segura y cómoda utilizando los expulsores integrados




Recuerda apuntar en el frasco de las tiras reactivas la fecha de apertura. ¡Puedes hacerlo con cualquier lápiz o bolígrafo!

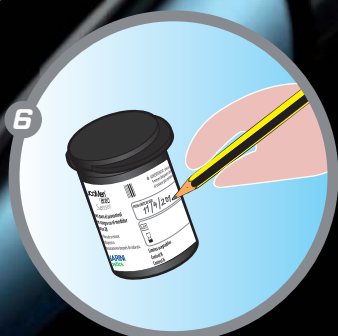

*El medidor detecta automáticamente si la tira reactiva es de glucosa o cuerpos cetónicos


GlucoMen® areo 2K

CÓMO REVISAR LAS MEMORIAS

Con el medidor apagado, presiona el botón de encendido  durante dos segundos



2

Cuando aparezca la palabra **mem** en la parte superior izquierda de la pantalla, selecciona con los botones de la derecha qué memorias deseas revisar: **Glu** para Glucosa, **Ket** para cuerpos cetónicos. Presiona  para confirmar





3

Para visualizar resultados anteriores en pantalla, utiliza los botones de selección en el lateral derecho del medidor




4

Para cambiar la selección, presiona durante 2 segundos el botón de encendido . Entonces, selecciona **Glu** o **Ket** con los botones que se encuentran en el lateral derecho del medidor. Presiona  para confirmar




5

Para apagar el medidor, al finalizar la revisión, mantén presionado el botón  durante 5 segundos




CÓMO REVISAR EL PROMEDIO DE RESULTADOS DE GLUCOSA




Con el medidor apagado, presiona el botón de encendido  durante dos segundos


Cuando aparezca la palabra **mem** y **Glu**, presiona el botón para seleccionar



Una vez hayas accedido a la memoria de resultados de glucosa, presiona  para revisar los promedios

Revisa los promedios de 1, 7, 14, 30, 60 y 90 días presionando el botón 

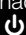

Para apagar el medidor, al finalizar la revisión, mantén presionado el botón  durante 5 segundos