









## MARCADORES DE LOS RESULTADOS DE GLUCOSA

Puede marcar sus resultados con los botones   seleccionando el tipo de marcador y seguidamente pulsando  :


-  Alarma: se activa y desactiva mediante los botones izquierdo/derecho:  . Luego pulse  para ajustar la alarma.
-  Resultado obtenido antes de una comida.
-  Resultado obtenido después de una comida.
-  Resultado obtenido después de realizar ejercicio físico.
-  Resultado marcado con un visto.

**Línea directa de atención al cliente**  
**900 301 334 - 93 507 10 44**  
**[www.menarinidiag.es](http://www.menarinidiag.es) - [www.diabetesmenarini.com](http://www.diabetesmenarini.com)**

42605-01/11



# GlucoMen<sup>®</sup> LX PLUS<sup>+</sup>

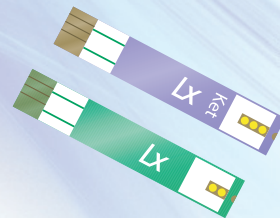

GUÍA RÁPIDA PARA EL ANÁLISIS DE GLUCOSA Y CUERPOS CETÓNICOS

 **A.MENARINI**  
diagnostics

No necesita calibración por parte del usuario

1



2

Mínimo volumen de sangre



3

Control del volumen de sangre



4

Resultado del análisis en 4 segundos



5

Expulsor de la tira incorporado



Si su resultado de glucosa es de 250 mg/dL o superior:

Se oirá una señal de alarma  
Aparecerá en pantalla:



Es necesario que efectúe un análisis de cuerpos cetónicos  
(Consulte a su médico o enfermera especialista)

